

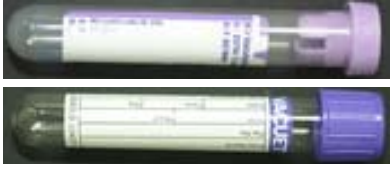


臺中榮民總醫院 兒童醫學部實驗室

採檢容器說明

容 器	用途與說明
	<ol style="list-style-type: none">1.黃紅頭管。2. IgE 檢驗用。3.抽血 5 ml。4.請送兒童醫學部實驗室
	<ol style="list-style-type: none">1.黃紅頭管。2.MAST 檢驗用。3.檢驗抽血 5 ml。4.請送兒童醫學部實驗室
	<ol style="list-style-type: none">1. CBC EDTA 紫頭管，核醫 EDTA 紫頭管2. CMV QPCR 檢驗用。3.週邊血 3 ml。4.請送兒童醫學部實驗室

臺中榮民總醫院 兒童醫學部實驗室

檢體重送、退收準則

編號	代碼	重送準則	備註
1	N/A	檢體溶血	嚴重溶血需重送。

臺中榮民總醫院 兒童醫學部實驗室

檢驗項目檢體保存期限及加作/複驗檢體之有效期限

編號	檢驗項目	保存溫度		加作效期 (時/天)	複驗效期 (時/天)
		2-8°C 冷藏	室溫		
1	IgE/免疫球蛋白 E	7 天	不適用	冷凍保存 2 個月	7 天
2	MAST	7 天	不適用	冷凍保存 2 個月	7 天
3	CMV QPCR	1 天	不適用	60 天	60 天

臺中榮民總醫院 兒童醫學部實驗室
檢驗項目總表

1. [IgE 免疫球蛋白 E](#)
2. [MAST](#)
3. [CMV QPCR](#)

檢 驗 項 目	IgE 免疫球蛋白 E		
生 物 參 考 區 間	6 Weeks <5.2	2 Years <51.7	7 Years <142
	3 Months <9.2	3 Years <72	8 Years <160
	6 Months <16.4	4 Years <90	9 Years <176
	9 Months <22.6	5 Years <108	10 Years <192
	12 Months <29.2	6 Years <126	10 Years up <200
採 檢 容 器 及 檢 體 量	含凝膠之生化管 全血 5 毫升		
採 檢 注 意 事 項	避免嚴重溶血		
檢 驗 方 法	FEIA		
可 送 檢 時 間	週一至週五：上午 8 點至下午 5 點 週六：上午 8 點至 12 點		
報 告 完 成 時 間	14 個工作天		
檢 驗 科 別 及 聯 絡 方 式	TEL：04-23592525 兒童醫學部實驗室分機：5931		
檢 驗 效 能	2-5000 kU/l		
實 驗 室 解 釋	不適用		
參 考 資 料	試劑說明書		
計 價 碼	60217022		
注 意 事 項	無		

[回 檢 驗 項 目 總 表](#)

檢 驗 項 目	MAST
生 物 參 考 區 間	CLA 的分級標準:0-4 級
採 檢 容 器 及 檢 體 量	含凝膠生化管 全血 5 毫升
採 檢 注 意 事 項	避免嚴重溶血
檢 驗 方 法	化學冷光(Chemiluminescence)用於體外測試人體血清中 IgE 濃度的半定量方法。
可 送 檢 時 間	週一至週五上午 8 點至下午 5 點;.週六上午 8 點至 12 點
報 告 完 成 時 間	14 工作天
檢 驗 科 別 及 聯 絡 方 式	TEL:(04)-23592525 兒童醫學部實驗室分機:5931
檢 驗 效 能	請參考檢驗項目可分析與臨床可發報告範圍
實 驗 室 解 釋	不適用
參 考 資 料	試劑說明書
計 價 碼	6021801
注 意 事 項	無

[回 檢驗項目總表](#)

檢 驗 項 目	CMV QPCR
生 物 參 考 區 間	正常人 未檢出
採 檢 容 器 及 檢 體 量	紫頭管
採 檢 注 意 事 項	採檢後應以低溫送抵兒童醫學部實驗室
檢 驗 方 法	即時定量 PCR
可 送 檢 時 間	週一至週五下午四點以前送至兒童醫學部實驗室
報 告 完 成 時 間	10 工作天以內
檢 驗 科 別 及 聯 絡 方 式	TEL：04-23592525 兒童醫學部分機：5931 分子實驗室：5988
檢 驗 效 能	請參考檢驗項目可分析與臨床可發報告範圍
實 驗 室 解 釋	CMV 屬於 Herpesviridae 病毒，一旦感染會潛藏在宿主身上終生。在潛伏期不會產生病毒顆粒，一旦宿主遭受外在逆境或因為免疫抑制及其他因素會導致 CMV 的復發。初次感染 CMV 的健康成人不會有症狀，但在免疫抑制的病人則會造成嚴重的臨床症狀。
參 考 資 料	試劑說明書
計 價 碼	60205170
注 意 事 項	無

[回 檢驗項目總表](#)

臺中榮民總醫院 兒童醫學部實驗室

量測不確定度

編號	項目名稱	報告單位	濃度 1	量測不確定度(%)	濃度 2	量測不確定度 (%)	濃度 3	量測不確定度(%)
1	CMV QPCR	Log(copy/ml)	3.67	5.28	4.60	3.13		
2	IgE	kU/l	17.3	13.7	85.5	14.7	452.9	17.0

更新日期：2017/12/08