

Klorsept拋棄式擦拭巾使用說明


10411制定
11211六修
11302七修
11401八修
11502九修

一、選擇所須漂白水濃度

- (一) 1000 ppm (1500 ml的水 + 6顆消毒錠-非隔離、空氣隔離、諾羅病毒、霍亂、困難梭狀芽孢桿菌、新冠病毒)
- (二) 20000 ppm (1500 ml的水 + 96顆消毒錠-庫賈氏症)

二、在1500ml的自來水加入消毒錠，待完全溶解。

三、把漂白水倒入專用水桶內，再蓋上蓋子，讓擦拭巾吸收漂白水。

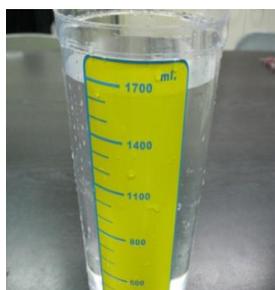

← 1500ml



四、待擦拭巾完全吸收漂白水後，找出中間第一張擦拭巾，塞入抽取孔拉出。未使用時請蓋上蓋子。



五、在貼紙上，以油性筆標示泡製濃度、泡製時間、到期時間及泡製人員姓名(前一次紀錄請先用酒精棉片擦拭後，再寫此次泡製紀錄)。

六、擦拭巾泡製後，可以使用24小時。



七、清潔消毒前，先抽取所須的擦拭巾張數(終期消毒須抽取2倍用量)，原則上一個部位使用一張擦拭巾，若明顯髒污，則增加擦拭巾的使用張數。

八、擦拭過程，請翻面利用不同接觸面擦拭。

九、若清潔消毒過程中須加抽擦拭巾，請脫手套後再抽取，以免造成污染。