


## 保脂通注射劑 75 毫克 預填注射筆

### alirocumab

#### 使用說明

Praluent 注射筆各部位如本圖所示。

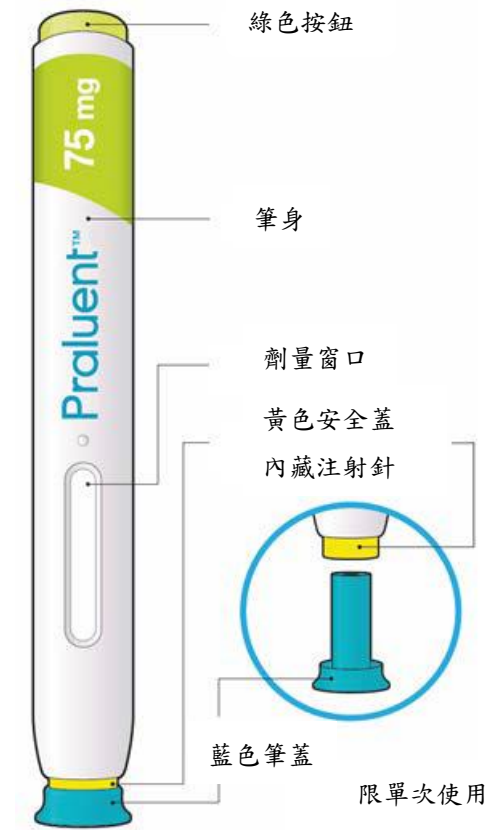

#### 重要資訊

- 此裝置為單次使用的預填注射筆。內含1毫升的Praluent (alirocumab) 75毫克。
- 此藥物應注射於皮下，可自行施打或由他人(照護者)注射。
- 此注射筆限單次注射使用，使用後應予以丟棄。

#### 請這樣做

- ✓ Praluent注射筆應放在兒童看不到且無法觸及處。
- ✓ Praluent注射筆使用前應詳讀所有說明。
- ✓ Praluent注射筆每次都應遵照說明使用。
- ✓ 未使用的注射筆應儲存於冰箱(2°C-8°C)。詳細儲存條件請另外參考Praluent仿單。

#### 請勿這樣做

- ✗ 請勿碰觸黃色安全蓋。
- ✗ 若注射筆掉落或受損，則請勿使用。
- ✗ 若注射筆的藍色筆蓋遺失或沒有牢牢套上，則請勿使用。
- ✗ 注射筆不可重覆使用。
- ✗ 注射筆不可震搖。
- ✗ 注射筆不可冷凍。
- ✗ 注射筆不可以直接曝曬於日光下。

請保存這份說明書。若您有任何問題，請諮詢您的醫師、藥師或護理師。

#### 步驟 A：準備注射

##### 注射前您需要準備：

- Praluent 注射筆
- 酒精棉
- 棉球或紗布
- 防穿刺容器 (見步驟B, 8)


##### ① 檢視注射筆上的標示

- 檢查產品及劑量是否正確。
- 檢查使用日期：若已過期，則請勿使用。



##### ② 檢視劑量窗口

- 檢查液體是否為澄清、無色至淡黃色且無顆粒— 若不是，則請勿使用 (見圖A)。
- 您可能會看到氣泡，此屬正常現象。
- 若劑量窗口出現黃色實線，則請勿使用 (見圖B)。

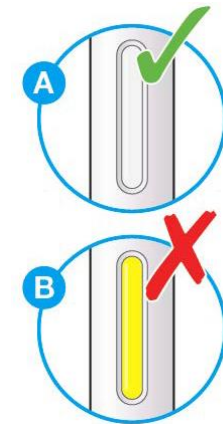

##### ③ 將注射筆放在室溫下 30-40 分鐘以使之回溫。

- 注射筆不可加熱，請讓其自行回溫。
- 注射筆回溫後請儘速使用。
- 注射筆不可再放回冰箱。

##### ④ 準備注射部位


- 以肥皂及清水洗手，然後再以毛巾擦乾
- 您可注射於：
  - 大腿

○ 腹部 (距肚臍5公分之外的區域)

○ 上臂外側


(如圖)

- 您可以站立或坐著注射。
- 請以酒精棉清潔注射部位的皮膚。
- 請不要注射於壓痛、粗硬、發紅或發熱的皮膚部位。
- 請不要注射於靜脈清晰可見處之周圍區域。
- 每次注射都應更換注射部位。
- Praluent不可與其他藥物注射於同一部位。

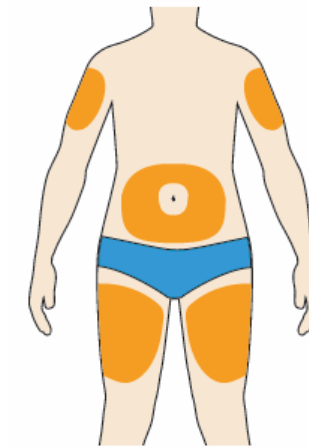

#### 步驟 B：如何注射

- ① 完成“步驟A：準備注射”之所有步驟後，拉開藍色筆蓋。
- 除非已準備好要進行注射，否則不可先行拉開筆蓋。
- 不可套回藍色筆蓋。

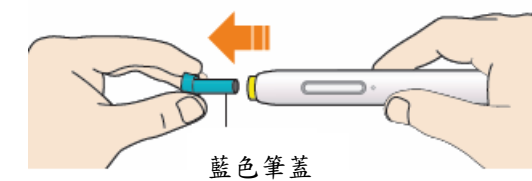


② 以下列方式握住 Praluent 注射筆

- 請勿碰觸黃色安全蓋。
- 請確認您可以看到劑量窗口。



③ 以大約 90 度角將黃色安全蓋向下壓入皮膚

- 緊握注射筆並將其壓入您的身體直到黃色安全蓋完全看不見為止。若黃色安全蓋沒有完全壓入，此注射筆無法使用。
- 如有必要，可以捏住皮膚以固定注射部位。

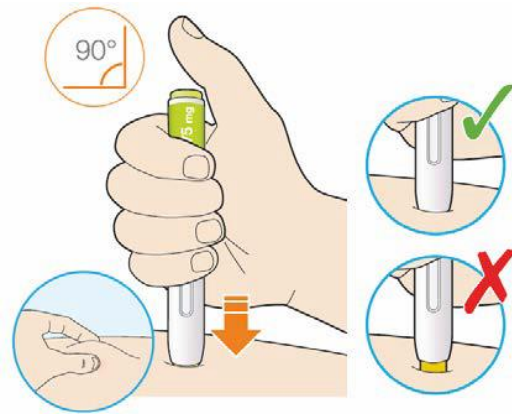

④ 以您的大拇指壓下綠色按鈕然後立刻鬆開。

- 您會聽到喀答一聲。這表示您已經開始注射。
- 劑量窗口會開始轉變為黃色。




⑤ 注射筆在鬆開按鈕後仍應握緊並抵住皮膚。

- 注射時間有可能長達 20 秒。




⑥ 拿開注射筆前，請先檢查劑量窗口是否變成黃色。

- 整個劑量窗口尚未完全變成黃色前，請勿將注射筆拿開。
- 當劑量窗口完全變成黃色後，這表示注射已完成，此時您會聽到第2聲喀答。
- 若劑量窗口沒有完全變成黃色，請連絡賽諾菲股份有限公司以尋求協助。未諮詢您的醫師、藥師或護理師前，請勿自行注射第2個劑量。

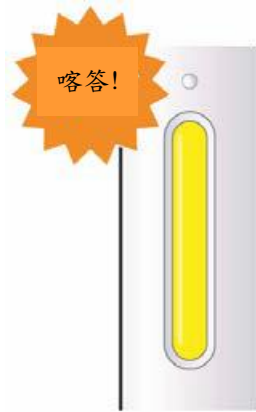

⑦ 將注射筆移開皮膚

- 注射後不要搓揉皮膚。
- 若您看到任何出血，請用棉球或紗布壓住該部位直到出血停止。

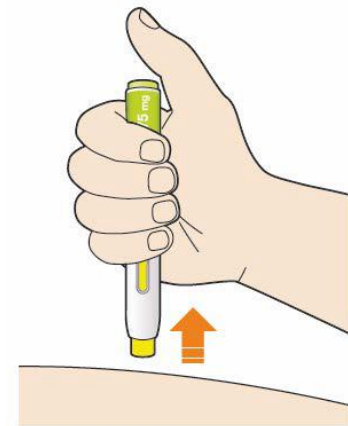

⑧ 丟棄注射筆及筆蓋

- 不可套回藍色筆蓋。
- 使用後，注射筆及筆蓋應立刻丟入防穿刺容器內。
- 容器的丟棄方式，請詢問您的醫師、藥師或護理師。
- 該容器應放在兒童看不見及無法觸及處。

