


預防手術部位感染 (Surgical Site Infection) 各種國際標準及指引皆建議：  
電動除毛刀可維持皮膚完整性，勿使用剃刀 (Razor)。

- ※1 「如果有移除毛髮的必要，在接近手術之前以電動除毛刀移除是較適合的。(IA)」  
Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection 1999, CDC
- ※2 「手術部位的毛髮移除，不應使用剃刀。剃鬚 (Shaving) 會增加手術部位感染機率。」  
Perioperative Standards and Recommended Practices 2013 Edition, AORN
- ※3 「除毛應盡可能在接近傷口切開的時間完成，而且應使用剪毛器，不宜使用剃刀。」  
財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會：病人安全目標二落實感染管制建議措施

臨床許多研究證實使用電動除毛刀，傷口感染率較使用剃刀 (Razor) 低：

- ※4 「使用剃刀會造成皮膚顯微傷口並增加手術部位感染 SSI 的風險」  
Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection 1999, CDC
- ※5 「手術當天早上以剪毛方式的一組 (AM Clipper) 與其他組別相比，有顯著較低的手術傷口感染率，剃毛 (shaving) 是有害的，醫院應該停止使用這種方式。」  
Alexander J.W. et al. The Influence of Hair Removal Methods on Wound infections. Archives of Surgery, 1983(118) : 347-352

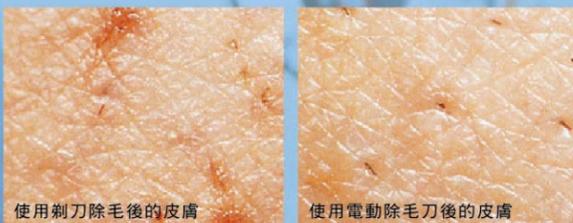

### 3M™ 通用型外科電動除毛刀

產品編號	產品名稱	數量
9681	外科電動除毛刀主機	4台/箱
9682	外科電動除毛刀充電器	1台/箱
9680	通用型拋棄式刀頭	50片/箱

衛署醫器陸輸壹字第001394號

#### ★注意事項：

- 初次使用應先將除毛器至於充電座上充電4小時。
- 電量處於電力過低的狀況下使用除毛刀進行除毛，可能造成過度放電使電池發生過熱情形，請每次用畢置回充電座充電。
- 為避免病患間交互感染，每次使用完刀頭應丟棄，不可重複給他人使用。



美商3M台灣子公司  
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司  
醫療保健產品事業部  
台北市11568南港區經貿二路198號3樓至8樓  
使用前請詳閱說明書警語及注意事項  
消費者服務專線：0800-086-197  
www.3m.com.tw

授權經銷商

# 3M™ Surgical Clipper Professional

## New

Raise  
the  
standard.

Lower  
your nick rate.



## 3M™ Surgical Clipper Professional 9681

# 專業級外科電動除毛器-正確操作方式



### 更換刀頭 ★確認電源開關處於關閉狀態



#### 裝置刀頭

打開刀頭包裝，握住除毛器主機，以近水平方式將除毛器主機向前滑卡入刀頭，將其固定。



#### 卸除刀頭

刀頭朝下，以拇指按壓藍色卸除鈕，將刀頭卸除至廢棄物容器。

### 進行除毛 ★避免過於施加壓力於病人皮膚



#### 推

像握鉛筆一樣的握住已裝上刀頭的除毛器，固定在皮膚表面上平整的或是些微弧度的地方，輕輕的逆著身體毛髮將除毛器推向前。



#### 拉

將已裝上刀頭的除毛器，固定在皮膚表面上平整的或是些微弧度的地方，輕輕的將除毛器拉向自己。

### ★清潔方式有三種★



#### 1. 沖洗

將除毛器於流動的溫水下沖洗。

#### 2. 擦拭

使用酒精或消毒劑擦拭除毛器。



#### 3. 浸泡

浸泡於消毒劑溶液中。不超過水深15公分；不超過15分鐘。



### ★注意事項：

- 為避免病患間交互感染，每次使用完刀頭應丟棄，不可重複給他人使用。



★所有清洗步驟需卸下刀頭並確認電源關閉，於下次使用前及置回充電座前，需確認除毛器徹底乾燥。

## 3M™ Surgical Clipper Professional 9681

### 專業級外科電動除毛器-正確充電方式

#### 1 確認乾燥



使用後關掉電源，將除毛器上的毛髮或其他污染物清理乾淨，並確認乾燥。

#### 2 置回充電座



除毛器應於每次使用之間放回充電座充電，避免持續處於低電力狀態。



80~100%  
60~80%  
40~60%  
20~40%  
0~20%  
電力剩餘量

#### LED電池餘量顯示

5階段電池餘量指示燈  
(搭配環保鋰電池)，  
當電力過低時，最下方LED燈將閃爍。



**4小時充電**  
**運作120分鐘**



#### ★注意事項：

- 初次使用應先將除毛器至於充電座上充電4小時。
- 電量處於電力過低的狀況下使用除毛刀進行除毛，可能造成過度放電使電池發生過熱情形，請每次用畢置回充電座充電。

