

## CIDEX OPA 消毒注意事項

### ■消毒時間：

自動清洗機設定 25°C，5 分鐘即可；人工清洗 12 分鐘

### ■消毒劑使用期限

- 1.倒出使用之消毒液 14 天（倒出日期+13 天，不應超過原裝瓶上標示之保存期限）
- 2.開封之消毒液（在原裝瓶內） 75 天（不應超過原裝瓶上標示之保存期限）

### ■濃度測試：

1. 測試時機：**每次使用前測試**，測試前請確認試紙在有效期限。
2. 試紙有效期限：開封後請在三個月內用完，開瓶後請在瓶身註明開瓶日期（若未及三個月已達效期，則使用至效期。）
3. 試紙保存：每次使用後請立即緊閉且確認容器罐蓋完全密合，以降低暴露於濕氣的程度。試紙一旦取出就不可以放回容器，未用完必須丟棄。
4. 濃度測試結果請登記於紀錄本，當濃度不足時，請更換消毒劑並在紀錄本上註記「更換消毒劑」（紀錄本及計時器可至供應中心索取）。