

# 輸注管路選用說明表

修訂日期：2023/09/12

點滴管路	選用原則
一般 Pump set (DEHP-free PVC 材質) CJ5440015034	一般化藥、兒科、人工血管不順 2020/02/04 起 Melphalan、Taxotere、Nalbaxol、 Etoposide、 Hospira Docetaxel
NTG set (PE 材質) CJ5725002012	Busulfex
避光未含過濾器 set (PE 材質) CJ5440015018	Bendamustine、Carmustine、Dacarbazine (D.T.I.C)、 Doxorubicin $\geq$ 22 小時、MTX $\geq$ 6 小時、Cisplatin > 6 小時、Fluorouracil (5-FU) > 24 小時、 Onivyde、Besponsa
避光含過濾器 set (PE 材質) CJ5725003017	Formoxol、Genetaxyl、Taxol、Torisel、Ixempra、 Jevtana、Cladribine、Kadcyla、Blinicyto、Polivy、 Yondelis、Enhertu(須避光)。

註 1：當藥物與 PVC 材質不相容時，需使用 non-PVC 材質之輸液容器(glass bot. 或 PP bot.)及 non-PVC 材質之輸注管路(PE set)。

註 2：自 109 年 2 月 4 日起本院使用的一般幫浦輸液套(型號 14687)已無 DEHP 溶出風險，故將 Melphalan、Taxotere、Nabaxol、Etoposide 所預設管路由 NTG-set(型號 14248)更改為一般幫浦輸液套(型號 14687)。

註 3：部分藥物長時間輸注時須使用**避光套**，以避免點滴袋中藥物受到光線分解，如：Cisplatin > 6 小時、Doxorubicin  $\geq$  22 小時、Fluorouracil (5-FU) > 24 小時、MTX  $\geq$  6 小時，及 Bendamustine、Carmustine、Dacarbazine (D. T. I. C)、Torisel、Onivyde、Besponsa。

註 4：Lipo-dox 及 Onivyde 「不可」使用含過濾器之管路

註 5：自 112 年 9 月 14 日起，取消 20 滴管路改以一般幫浦輸液套(型號 14687)替代。